



Préparation de la pompe à perfusion BodyGuard 323 Color Vision™


- 1 Suspendre et perforer la poche de sérum physiologique, puis remplir lentement le goutte-à-goutte jusqu'à la moitié.

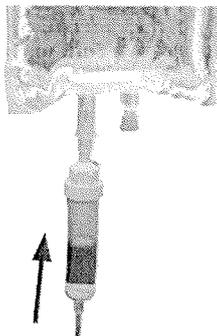


- 2 Brancher et mettre sous tension la pompe en appuyant sur le bouton ON/OFF

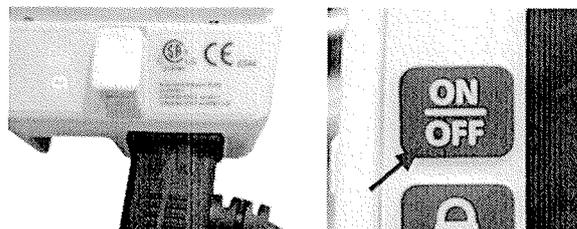

- 3 Ouvrir le capot et installer le tuyau de la pompe de gauche à droite. S'assurer que la patte de fixation est correctement insérée, puis fermer le capot.

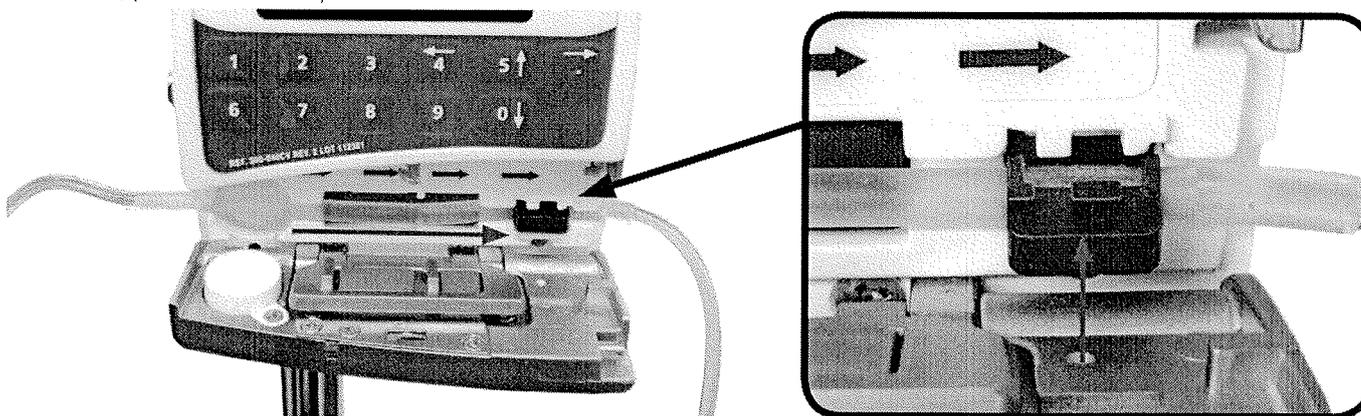

- 4 Appuyer sur le bouton Prime (Amorcer), puis appuyer immédiatement sur Start (Démarrer). Renseigner 20 ml pour le volume d'amorçage, puis appuyer sur Start (Démarrer).

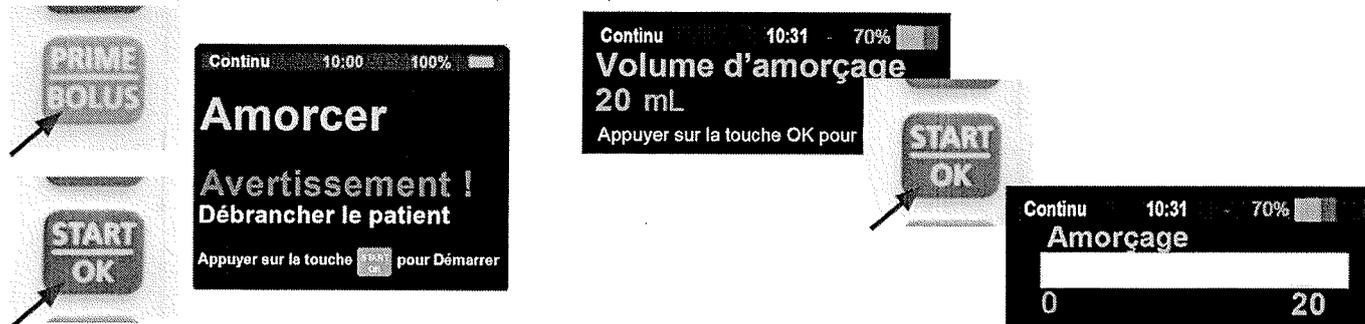

- 5 Raccorder le clapet de non-retour de l'orifice de rinçage d'étanchéité à la cartouche, puis raccorder le set d'administration IV au clapet de non-retour. Appuyer ensuite sur Start (Démarrer) pour commencer.



i La valeur de concentration peut être réglée sur 0,0 puisqu'elle ne s'applique pas au sérum physiologique.


6 Renseigner 30 ml pour la donnée Rate (Débit), puis appuyer sur Start (Démarrer).




7 Renseigner le volume réel de la poche IV pour la donnée Volume, puis appuyer sur Start (Démarrer).



8 Vérifier les données à l'écran, puis appuyer sur Start (Démarrer).

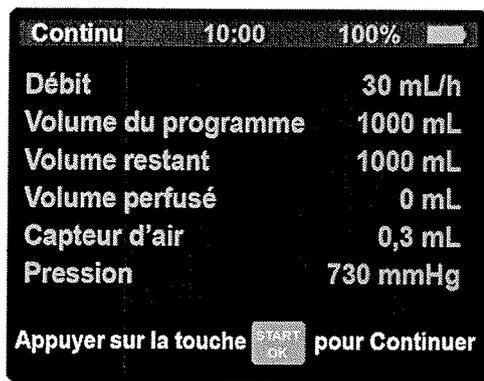

9 Appuyer sur Start (Démarrer) lorsque vous êtes prêt.

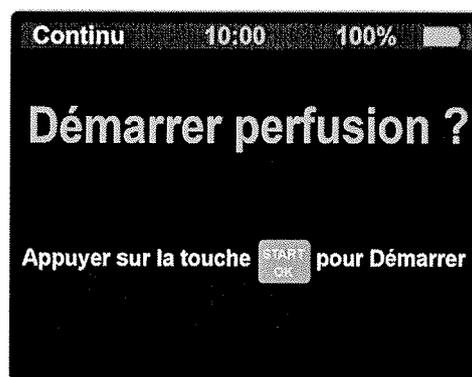

10 La perfusion démarre et le débit est affiché. Vérifier que le voyant vert clignote.



Pour plus d'informations, consulter le manuel du BodyGuard 323 Color Vision™.



S'assurer que la pompe est réglée sur Continuus (Programme continu).